




**A Terapia com Vapor de Água Rezūm** é um procedimento curto, feito em consultório, que usa a energia natural armazenada no vapor de água, ou vapor, para encolher próstatas aumentadas.<sup>1,2</sup>

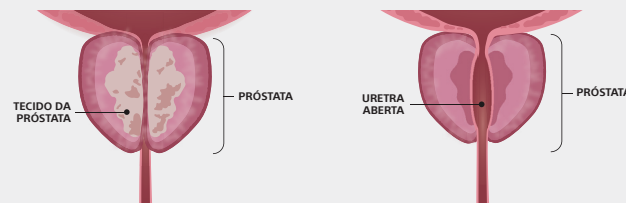

**Antes**

Uma próstata aumentada pode comprimir a uretra, dificultando a passagem da urina pela bexiga.

**Depois**

Após o tratamento com a Terapia Rezūm, seu corpo cicatriza e o tecido adicional desaparece, a uretra se abre e a urina pode fluir livremente.

Esta representação é apenas para fins ilustrativos. Ela não se destina a descrever o desempenho clínico.

A Terapia Rezūm é normalmente realizada no consultório do seu urologista ou em uma unidade de cirurgia ambulatorial.

Durante cada tratamento de 9 segundos, o vapor de água estéril é liberado em todo o tecido alvo da próstata\*. O número de tratamentos varia de acordo com o tamanho da sua próstata.

Com o tempo, a resposta de cura natural do seu corpo absorve o tecido tratado, encolhendo a próstata. Com o tecido adicional removido, a uretra se abre, reduzindo os sintomas da HPB.

A maioria dos pacientes começa a sentir alívio dos sintomas em duas semanas, e o benefício máximo pode ocorrer em três meses.\*<sup>1,2</sup>

*As respostas dos pacientes podem variar e variam.*

## Por que escolher a Terapia com Vapor de Água Rezūm?

Se você sofre de HPB, a Terapia Rezūm oferece muitos benefícios.



Chega de medicamentos para HPB e seus efeitos colaterais<sup>3</sup>



Estudos clínicos mostram que a Terapia Rezūm alivia os sintomas com segurança/eficácia<sup>1,2</sup>



A maioria dos pacientes apresenta melhora dos sintomas em duas semanas\*<sup>1,2</sup>



Terapia em consultório/ambulatório<sup>1</sup>



Não requer anestesia geral<sup>1</sup>



Preserva a função sexual<sup>1</sup>



Capacidade de retornar às atividades regulares dentro de alguns dias\*<sup>1,2</sup>



Alívio de sintomas duradouro<sup>1</sup>



Sem implante permanente




Liberado pela FDA; Incluído nas diretrizes da *American Urological Association* [Associação Urológica Americana]

**“Decidi seguir em frente com Rezūm porque vi que havia efeitos colaterais com remédios ou alguns procedimentos cirúrgicos pelos quais não queria passar.”**

– Tim, paciente de Rezūm

As respostas dos pacientes podem variar e variam.

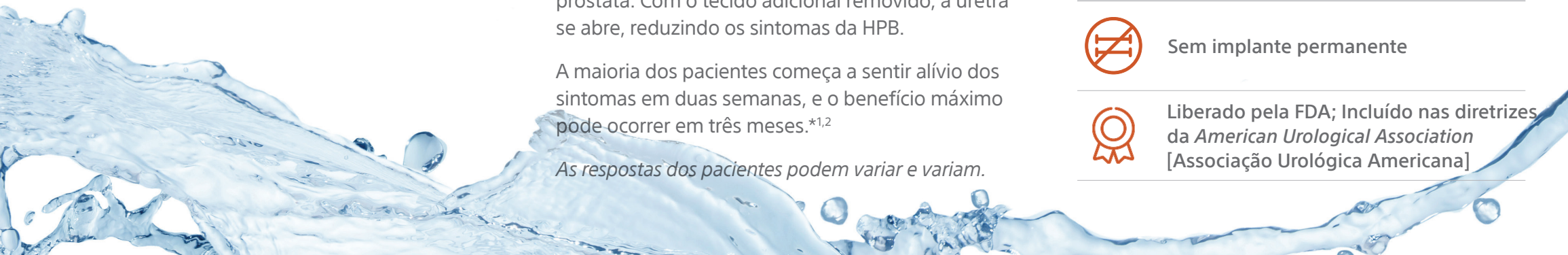

## Buscando alívio duradouro dos sintomas de HPB?



Acorda a toda hora para urinar?



Tem necessidade urgente de ir ao banheiro?



Fluxo fraco?



Sofre com efeitos colaterais dos medicamentos para HPB?

E se houvesse uma maneira melhor de chegar à causa raiz de sua HPB e com isso, após o tratamento, se livrar dos sintomas de forma significativa e duradoura?

A Terapia com Vapor de Água Rezūm trata a origem da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) - a próstata aumentada. Este curto procedimento no consultório usa a energia natural armazenada em algumas gotas de água para encolher a próstata. Assim, a urina pode fluir livremente. Não há incisões, nem anestesia geral, e a maioria dos pacientes retorna às atividades normais em poucos dias.\* E ela preserva a função sexual.<sup>1,2</sup>

**Rezūm levando sua vida ao máximo. Porque esperar?**

## Assista a um vídeo sobre HPB e Terapia Rezūm

Siga estas etapas fáceis:



- 1 Abra o aplicativo de câmera do seu telefone
- 2 Aponte a câmera para o código QR e seu telefone reconhecerá o código
- 3 Toque no alerta na parte superior da tela para reproduzir o vídeo

Alguns telefones podem não ter o suporte de código QR por meio de sua câmera. Basta digitar **Rezūm.com/Video** no seu navegador para ver o vídeo.

**Para saber mais sobre a Terapia Rezūm e como ela pode reduzir com segurança e eficácia os sintomas da HPB, visite Rezūm.com.**

Todos os tratamentos têm riscos inerentes e associados. O Sistema Rezūm destina-se a aliviar os sintomas, obstruções e reduzir o tecido da próstata associado à HPB. Ele é indicado para homens  $\geq 50$  anos com volume prostático  $30\text{cm}^3 < 80\text{cm}^3$ . O Sistema Rezūm também é indicado para o tratamento da próstata com hiperplasia da zona central e/ou lobo mediano. Os riscos potenciais incluem, entre outros, dor ao urinar (disúria), sangue na urina (hematúria), sangue no sêmen (hematospermia), diminuição do volume ejaculatório, suspeita de infecção do trato urinário (ITU) e frequência, retenção ou urgência urinária. Você deve conversar com seu médico sobre os benefícios e riscos antes de avançar com qualquer opção de tratamento.

### REFERÊNCIAS E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE

\*Depende da situação clínica individual e da resposta de cura.

1. McVary KT, Rogers T, Roehrborn CG. Rezūm water vapor thermal therapy for lower urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia: 4-year results from randomized controlled study. *Urology*. 2019 Apr;126:171-9.
2. McVary KT, Gange SN, Gittelman MC, et al. Minimally invasive prostate convective water vapor energy (WAVE) ablation: A multicenter, randomized, controlled study for the treatment of lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia. *J Urol*. 2016 May;195(5):1529-38.
3. Roger K, Gilling P. Fast Facts: *Benign Prostatic Hyperplasia*, 7th edition. Health Press. 2011.

CUIDADO: A lei restringe a venda desses dispositivos por ou mediante ordem de um médico. Indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas nas informações fornecidas com cada dispositivo ou em [www.IFU-BSCI.com](http://www.IFU-BSCI.com). Os produtos exibidos são apenas para fins INFORMATIVOS e podem não estar aprovados ou disponíveis para venda em certos países. Este material não é destinado ao uso na França. Copyright 2023 © Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Os resultados de estudos de caso não são necessariamente preditivos dos resultados em outros casos. Os resultados em outros casos podem variar.

**Boston Scientific**  
Advancing science for life™

Rezūm.com é um site patrocinado pela Boston Scientific.  
©2020 Boston Scientific Corporation ou suas coligadas.  
Todos os direitos reservados. URO-1619503-AA JUL 2023

Boston Scientific Corporation  
300 Boston Scientific Way,  
Marlborough, MA 01752  
<https://www.bostonscientific.com/pt-BR/>

O CONTEÚDO É FORNECIDO PELA BOSTON SCIENTIFIC. A BOSTON SCIENTIFIC ESTÁ DEDICADA A TRANSFORMAR VIDAS POR MEIO DE SOLUÇÕES MÉDICAS INOVADORAS QUE MELHORAM A SAÚDE DE PACIENTES EM TODO O MUNDO

**Rezūm™**  
Terapia com Vapor de Água

**Boston Scientific**  
Advancing science for life™



**Rezūm noites sem ir ao banheiro.**

**Rezūm™**

A Terapia com Vapor de Água Rezūm™ é uma alternativa natural à cirurgia. Ela trata a causa da sua HPB, para que você possa voltar à sua vida.